

# DUB Kullanım Kılavuzu

1. Bilgisayarın ve DUB cihazının elektrik bağlantılarını yapınız.
2. Bilgisayarın açık olduğundan emin olunuz
3. DUB cihazının arkasında bulunan güç kaynağını açınız ve cihazın önünde bulunan yeşil ışığın yandığını görünüz.
4. Bilgisayarın masaüstünde bulunan "DUB-SkinScanner" simgesine çift tıklayınız.
5. Açılan program ekranının sağ üst kısmındaki pencerede bulunan "DATA" klasörüne sağ tıklayınız. "Create Folder" sekmesini seçiniz. Yeni oluşturulan dosya adına hasta adı ve soyadını yazınız.
6. Yine aynı ekranın sağ alt kısmında bulunan "Start Scan" butonuna bir defa tıklayın.
7. Açılan hasta kartında boşluklara gerekli bilgileri giriniz ve "OK" butonuna tıklayınız.
8. Şu anda cihaz, tespit edilen bölgenin analizini yapmaya hazır durumdadır.
9. Analiz yapılacak bölgeyi tespit ediniz.
10. Scanner'a monte edilen enjektörü su ile doldurunuz ve cihaza monte ediniz.
11. Analizi yapılacak bölgeye scanner'ın ucunu boşluk bulunmayacak şekilde temas ettiriniz ve hafifçe enjektördeki suyu cilde temas ettiriniz.
12. Görüntünün doğruluğundan emin olana dek enjektörden cihaza su enjekte ediniz (ortalama 5-6 saniye). Görüntüyü durdurmak için scanner'ın üzerindeki butona tekrar basıp çekiniz.
13. Ekrandaki görüntü penceresinin altında bulunan "Store and Back" butonuna tıklayınız.
14. Ekranın sağ orta kısmındaki listeden daha önce oluşturduğumuz hasta kartında adı ve soyadını seçiniz.
15. Seçilen adı ve soyadı üzerine sağ tıklayarak açılan menüden "save scan as" linkini seçiniz.
16. Açılan pencerede bulunan "konum" sekmesinden daha önce hasta adı ve soyadıyla oluşturduğunuz dosyayı bulunuz ve bu dosyanın içine kaydediniz.
17. Ekranın sağ üst penceresinde bulunan dosyalar listesinden hastanın görüntüsüne çift tıklayınız.
18. "Measure" butonuna tıklayınız.
19. "H" butonunun sağında bulunan "Phase Correction" butonuna tıklayınız
20. Ekranda bulunan iki sarı ve iki kırmızı çizgiyi Depth=2500 olacak şekilde ayarlayınız.
21. Bilgisayarınızın klavyesi üzerinde (sağ üst) bulunan Prt Sc (print screen) tuşuna bir defa basıp çekiniz.
22. Bilgisayarınızın başlat menüsüne tıklayınız.
23. Paint programını açınız ve Ctrl ile V tuşuna aynı anda basarak ya da sağ tıklayıp açılan menüden "yapıştır"a tıklayarak görüntüyü yapıştırınız.
24. Paint'e kaydedilen görüntü ve değerleri bilgisayar ekranının masaüstünde bulunan hasta dosyalarına kaydediniz.